


Quick Guide Testdurchführung und Reinigung

LENSHOOKE® X1 PRO Semen Quality Analyzer


1. LensHooke® mit Lizenzschlüssel aufladen



Lizenz-Dongle befindet sich im Deckel jeder Packung.

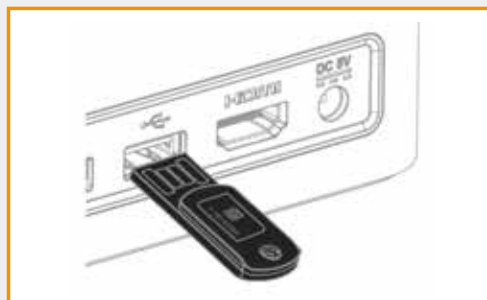

Lizenz-Dongle in den USB-Anschluss stecken, ca. **20 Sekunden** warten, bis das Symbol „Nachfüllen“ auf dem Bildschirm erscheint.

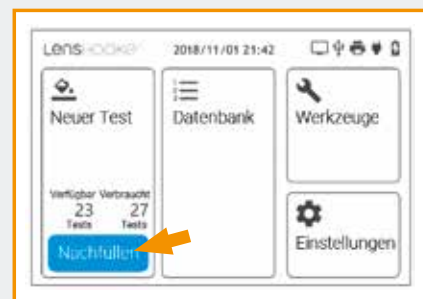


Nach Überprüfung der Auffüllinformationen und Entfernen des Dongles müssen auf dem Startbildschirm unter „Verfügbare Tests“ 50 dazugezählt worden sein.


2. Durchführen eines SpermioGRAMMS



Klicken Sie am Startbildschirm auf das Feld „Neuer Test“ und geben Sie einen Namen oder eine ID-Nummer ein. Dieses Feld muss ausgefüllt werden! Klicken Sie anschließend auf „▶“. Folgende weitere Angaben sind optional und können übersprungen werden: Öffnen Sie eine frische Testkassette und legen Sie sie auf eine gerade Fläche.

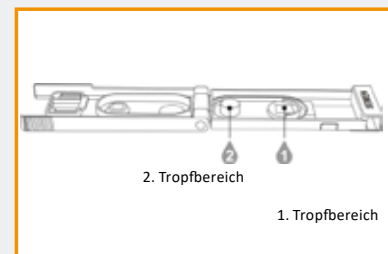

Durchmischen Sie die Probe unmittelbar vor dem Testen nochmals gründlich. Entnehmen Sie mit einer Pipette jeweils ca. 40 µL und bringen Sie die Flüssigkeit auf den Tropfbereich 1 und 2 der Testkassette auf.

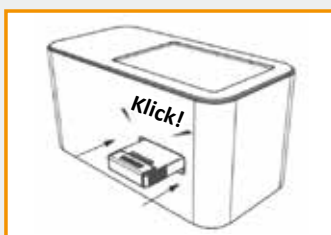

Schließen Sie das Schloss der Testkassette und führen Sie sie ins Gerät ein, bis Sie ein Einrasten hören. Nach 3-5 Minuten erscheint das Testergebnis.

Das Ergebnis erhalten Sie nach ca. 5 Minuten!

Warten Sie unbedingt, bis das Gerät Sie zur Entnahme der Testkassette auffordert, sonst kann die Erstellung des Videos unterbrochen werden!